

IHR DESIGN

Anwendung

1. Reissen Sie die Versiegelung an der gezackten Seitenkante vorsichtig auf. Achten Sie dabei darauf, das Kondom nicht mit schräkantigen Gegenständen (Schmuck, etc.) oder Fingernägeln zu beschädigen.



2. Halten Sie das Reservoir an der Spitze des Kondoms so mit Daumen und Zeigefinger, dass dort kein Luftpolster entsteht.

3. Damit das Kondom vor sexuell übertragbaren Krankheiten und Schwangerschaft schützen kann, rollen Sie das Kondom vollständig über den steifen Penis ab, bevor es zur ersten Berührung zwischen Penis und Vagina kommt.

4. Ziehen Sie den Penis nach dem Samenerguss behutsam aus der Scheide, bevor der Penis erschlafft. Halten Sie dabei das Kondom am Penisansatz fest.


Zusätzliche Gleitmittel

Vorsichtig bei der Verwendung von zusätzlichen Gleitmitteln. Die Anwendung von Vaseline oder fetthaltigen Gleitmitteln wie Babyöle, Körperlotionen, Massageöle, Speiseöle können das Kondom beschädigen. Verwenden Sie nur Gleitmittel die ausdrücklich für den Gebrauch mit Latexkondomen empfohlen werden.

Wichtiger Hinweis

Das gebrauchte Kondom in den Abfalleimer werfen und nicht in die Toilette. Verwenden Sie Kondome immer nur einmal!
Kondome erzeugen grundsätzlich keine Nebenwirkungen. Sollten dennoch Unverträglichkeitsreaktionen (z.B. Latex Allergie) auftreten, fragen Sie bitte Ihren Arzt um Rat. Bei gleichzeitiger äußerlicher Anwendung von rezeptpflichtigen oder rezeptfreien Medikamenten an Penis oder Vagina, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker über deren Verträglichkeit mit Kondomen. Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz vor Schwangerschaft oder Infektionen garantieren. Bei richtiger Anwendung bieten Kondome von ONI einen guten Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten.

IHR DESIGN

Inhalt: 1 ONI Natural Feeling Kondom aus Naturkautschuklatex, feucht,
transparent, mit Reservoir. Normale Weite: 54mm. Bitte beachten Sie die
Gebrauchsanweisung auf der Packungsinnenseite. Vor direkter Sonnen-
einstrahlung und Hitze schützen; kühl und trocken aufbewahren.
Hergestellt nach der Norm ISO 4074: 2002. Hersteller:
R&S consumer goods GmbH, Postfach 860672, D-81633 München.
Vertrieb durch: Vinco - World of Condoms, Maggistr. 7, D-78224 Singen
XXXX-XX XXXXXXXX  XXXXXXXX
www.wetbekondome.com

CE 0197